


検診車 Q 説明書

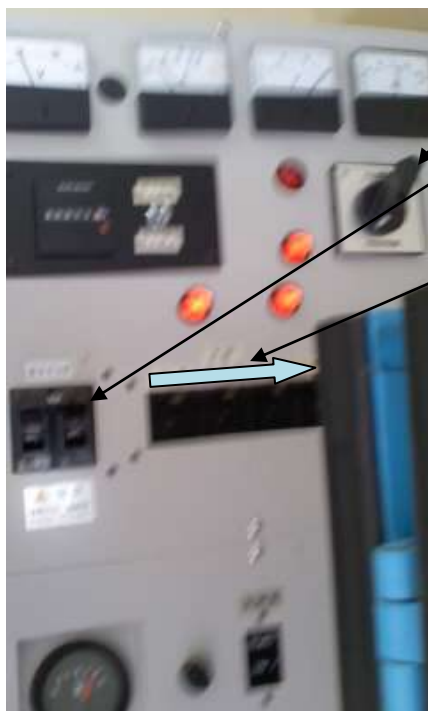

発電機始動・・・長押し上げ（15秒ぐらい）

メイン電源：ON

システム電源：ON



UPS 電源 ON

蓋をあける



Canon システムサーバーON




電源スイッチ

130キロボルト標準設定



ナンバーリング設定

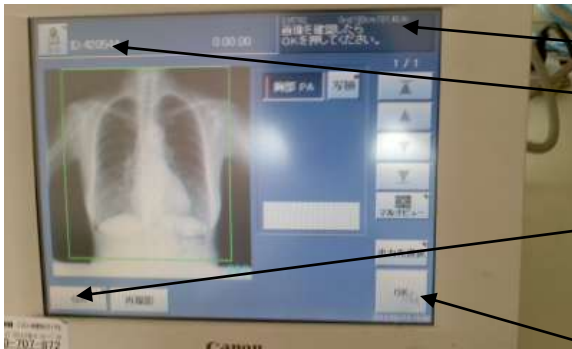


ブルーに反転している場合撮影
できません：グリーンの ready
にて撮影可能

OK クリック


修正不要の場合 OK で終了



幾何をクリックする

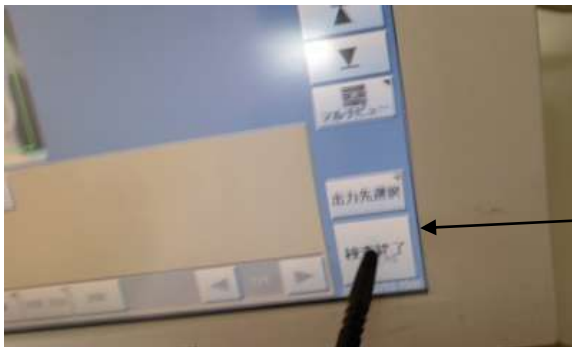

検査終了

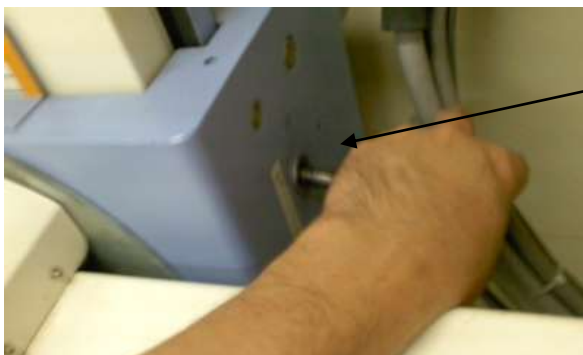

全て終了装置 OFF

固定ボルトをさし込み固定
ベルトで管球とデテクターを締
め固定

撮影も大切ですが、それ以上に台帳整理や連絡票などの書類作成提出が毎回必要になります

慣れてくるまでは必ず職員に確認してもらいましょう




現場の班長に撮影連絡票を渡す



DVD 記録面と撮影番号、件数を記入

A 面記録 DVD

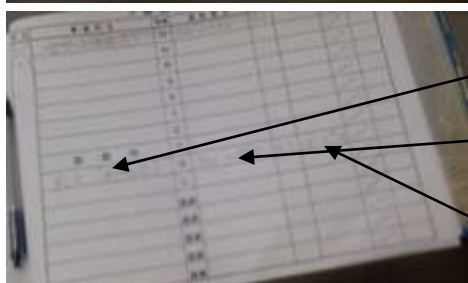

検診場所記入

撮影番号

担当者：助手



鉛筆で薄書き表示、フィルム棚下のボックスに入れる